



# Bedienungsanleitung

ReSound Individuell maßgefertigte Ladeschale

**GN** Making Life Sound Better

[resound.com](https://resound.com)

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Einführung .....                                    | 3  |
| Vorgesehener Verwendungszweck .....                 | 4  |
| Symbole .....                                       | 5  |
| Kennenlernen der Ladeschale .....                   | 7  |
| Erste Schritte .....                                | 9  |
| Reinigung und Pflege .....                          | 14 |
| Allgemeine Warnhinweise .....                       | 18 |
| Warnhinweise für Hörakustiker:innen .....           | 20 |
| Technische Daten .....                              | 21 |
| Problemlösung .....                                 | 22 |
| Garantie und Reparaturen .....                      | 25 |
| Temperaturprüfung, Transport und Aufbewahrung ..... | 27 |
| Position der Seriennummern .....                    | 29 |
| Erklärung .....                                     | 31 |
| Danksagungen .....                                  | 34 |

# Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Hörsysteme mit Ladeschale! Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Unsere innovative Ladetechnologie bietet Ihnen mehr Freiheit und Flexibilität.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie alle Funktionen Ihrer neuen Ladeschale kennenlernen. Mit der richtigen Handhabung und Pflege haben Sie lange Freude an Ihren Hörsystemen mit Ladeschale und genießen ein dauerhaft besseres Hörerlebnis.

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Handhabung der Ladeschale. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Hörsysteme finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

# Vorgesehener Verwendungszweck

Die Ladeschale ist zum Laden von aufladbaren Hörsystemen vorgesehen. Die Ladeschale darf nur mit aufladbaren ReSound Hörsystemen genutzt werden.

Die Hörsystemladeschale ist für den Gebrauch durch nicht fachkundige Personen bestimmt.

Keine Kontraindikationen bekannt.

# Symbole



**WARNHINWEIS:** Gefahren, die zu schweren Verletzungen führen können.



**VORSICHT:** Gefahren, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen können.



**HINWEIS:** Tipps und Empfehlungen für den optimalen Umgang mit Ihrer Ladeschale.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung.



Hersteller.



Temperaturgrenzwerte.



Wenden Sie sich für die Entsorgung der Ladeschale an Ihren Hörakustiker vor Ort.

**HINWEIS:** Es können länderspezifische Vorschriften gelten.



Erfüllt die Anforderungen von ACMA.

Complies with  
IMDA Standards  
DA105282


Erfüllt die Anforderungen von IMDA.

**MD**

Medizinprodukt.


# Kennenlernen der Ladeschale

1. Hörsystem
2. Hörsystem in Ladeposition
3. Die Einsatzschale
4. Grüne LED-Ladeanzeigen

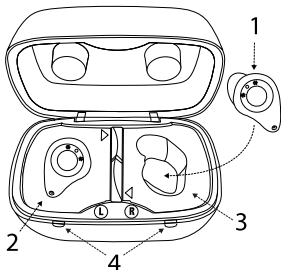

## Rückansicht der Ladeschale

1. Grüne LED-Betriebsanzeige
2. USB-C-Kabelbuchse

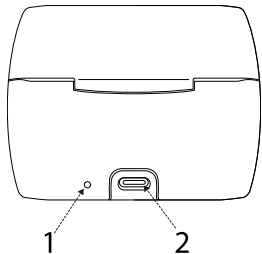



# Erste Schritte

## Einsetzen der Hörsysteme in die Ladeschale


Laden Sie Ihre Hörsysteme vor der Verwendung vollständig auf.




### **VORSICHT:**

- Achten Sie darauf, dass Ihre Hörsysteme trocken sind, bevor Sie sie in die Ladeschale legen.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die von ReSound mitgelieferte Ladeschale.

1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine Steckdose an und verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladeschale.

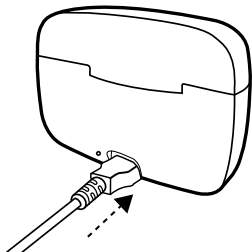

2. Das linke Hörsystem gehört in die Vertiefung mit dem blauen „L“ (links). Das rechte Hörsystem gehört in die Vertiefung mit dem roten „R“ (rechts). Die LED leuchtet auf, wenn der Deckel geschlossen ist, was anzeigt, dass der Ladevorgang eingeleitet wurde.

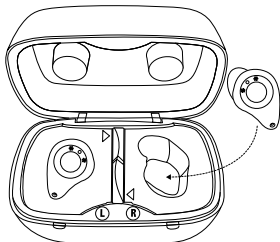



## **HINWEIS:**

- Stellen Sie sicher, dass die Hörsysteme vollständig in die Ladeschale eingesetzt wurden. Der Ladevorgang beginnt erst, wenn der Deckel geschlossen ist.
- Wenn die Hörsysteme zum ersten Mal in die Ladeschale gelegt werden, können sie beim Einschalten der Ladeschale kurz pfeifen. Das ist normal.



## **WARNHINWEIS:**

- Halten Sie Ihr Ladegerät und wiederaufladbare Hörsysteme von Haustieren, Kindern und Personen mit kognitiven, intellektuellen oder geistigen Beeinträchtigungen fern.
- Laden Sie das Gerät nicht an Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Benutzen Sie die Ladeschale nicht im Freien oder in feuchten Bereichen.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die Ladeschale, die mit Ihren Hörsystemen mitgeliefert wurde.

## Laden der Hörsysteme

Das Aufladen erfolgt nur, wenn die Hörsysteme korrekt in die Ladeschale eingesetzt sind und der Deckel der Ladeschale geschlossen und die Ladeschale korrekt an eine Steckdose angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs wird die LED-Anzeige der Ladeschale abgedunkelt, um den Schlaf nicht zu stören. Sie können eines oder beide Hörsysteme aufladen, da das Aufladen unabhängig voneinander erfolgt.



**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Hörsysteme vollständig in die Ladeschale eingesetzt sind.

| Muster der LEDs an der Ladeschale |                  |   |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Ort                               | LED-Blinkmuster  | LED zeigt an  |
| Zurück                            | Grün (konstant). | Angeschaltet.   |
| Vorn                              | Grün (konstant). | Das Hörsystem ist vollständig aufgeladen. Jedes Hörsystem verfügt über eine eigene LED-Anzeige. |

## Muster der LEDs an der Ladeschale

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Grün, langsames Pulsieren<br>(2 Sekunden ein, 2 Sekunden aus).                                       | Wird aufgeladen. Kann für eine oder beide Seiten gelten.              |
|  | Langsames Pulsieren an einer einzelnen grünen LED und konstantes grünes Leuchten an der anderen LED. | Ein Hörsystem wird geladen und ein Hörsystem ist vollständig geladen. |
|  | Schnelles Blinken<br>(1/2 Sekunde ein, 1/2 Sekunde aus).   | Fehler – Siehe "Problemlösung", Seite 22                              |

# Reinigung und Pflege

## Reinigung und Pflege



**HINWEIS:** Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um Ihre Ladeschale optimal zu nutzen und die Lebensdauer zu verlängern:

- Halten Sie die Hörsystemladeschale trocken und sauber.
- Wischen Sie die Hörsystemladeschale nach Gebrauch mit einem trockenen, weichen Tuch ab, um Rückstände und Feuchtigkeit zu entfernen.

## Reinigung der Hörsystemladeschale

1. Reinigen Sie die Außenseite der Ladeschale mit einem trockenen, sauberen Tuch.
2. Reinigen der Einsätze, während sie in der Ladeschale sind:  
Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Wattestäbchen.
3. Für eine gründlichere Reinigung mit warmem Wasser können Sie den Einsatz herausnehmen – Siehe "Entfernen der Ladeschale zur Reinigung", Seite 16.


- Bei Verwendung von Wasser zur Reinigung des Einsatzes: Achten Sie darauf, dass der Einsatz vollständig trocken ist, bevor Sie ihn in die Ladeschale einsetzen.




**WARNHINWEIS:** Verwenden Sie zur Reinigung der Hörsystemladeschale keine Flüssigkeiten.

## Entfernen der Ladeschale zur Reinigung

1. Drücken Sie die hintere Klemme nach rechts, um den linken Einsatz zu lösen. Der linke Einsatz tritt hervor.
2. Entnehmen Sie den linken Einsatz zur Reinigung.

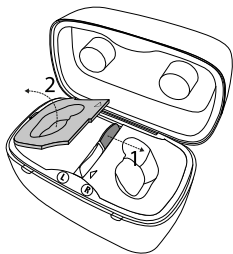

3. Drücken Sie die vordere Klemme nach links, um den rechten Einsatz zu lösen. Der rechte Einsatz tritt hervor.
4. Entnehmen Sie den rechten Einsatz zur Reinigung.
5. Einsätze sollten nur mit warmem Wasser auf einem sauberen Tuch gereinigt werden.

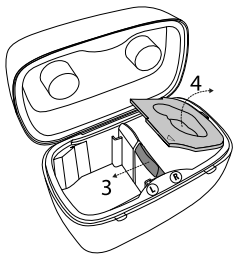




## Austausch der Einsätze

Die Einsätze sind speziell geformt, um einen korrekten Sitz in der Ladeschale zu gewährleisten.

1. Setzen Sie die Einstecklasche des linken Einsatzes in die Aussparung auf der linken Seite der Ladeschale.
2. Drücken Sie die rechte Seite vorsichtig nach unten, bis sie einrastet.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Einsatz.

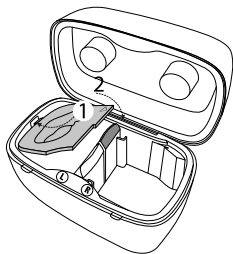

# Allgemeine Warnhinweise



## WARNHINWEIS:

- Diese Ladeschale enthält Kleinteile. Verschlucken von Kleinteilen kann zum Erstickten führen. Bei Verschlucken von Kleinteilen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie Ihr Ladegerät und wiederaufladbare Hörsysteme von Haustieren, Kindern und Personen mit kognitiven, intellektuellen oder geistigen Beeinträchtigungen fern.
- Halten Sie die Hörsystemladeschale von übermäßiger Hitze wie Öfen und Mikrowellengeräten sowie direkter Sonneneinstrahlung fern. Hitzeeinwirkung kann das Gehäuse verformen, die Elektronik beschädigen und die Oberflächen verändern.
- Verwenden Sie die Ladeschale niemals an Orten mit explosiven Gasen wie Minen, Ölfeldern oder ähnlichen Umgebungen, es sei denn, diese sind für den Einsatz von Hörsystemen freigegeben. Die Verwendung der Hörsystemladeschale an nicht freigegebenen Orten kann gefährlich sein.

- Ziehen Sie das Stromkabel oder Verlängerungen immer am Stecker und nicht am Kabel ab.
- Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig.
- Versuchen Sie nicht, die Ladeschale auseinander zu bauen, da die Gefahr eines gefährlichen Stromschlags besteht und der Gewährleistungsanspruch erlischt.
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladeschalen. Eine Beschädigung oder ein falscher Wiederausbau kann bei anschließender Verwendung des Produkts zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Wenn das Ladegerät Temperaturen außerhalb des unterstützten Bereichs ausgesetzt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in ein heißes Auto legen.
- Wenn Sie Wireless-Funktionen nutzen, sendet und empfängt Ihre Ladeschale schwache, digital kodierte Signale zur Kommunikation mit anderen Wireless-Geräten. Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass andere elektronische Geräte dadurch beeinflusst werden. Vergrößern Sie in einem solchen Fall den Abstand zum betreffenden elektronischen Gerät.

# Warnhinweise für Hörakustiker:innen



## WARNHINWEIS:

- Externe Geräte, die an den elektrischen Eingang angeschlossen werden, müssen die Sicherheitsanforderungen von IEC 60601-1, IEC 60065, IEC 62368-1 oder äquivalent erfüllen.

# Technische Daten

| Individuell angefertigte Ladeschale                 |  |
|---|--|
| Maße  | 82 mm x 48 mm x 58 mm  |
| Gewicht   | 108 g  |
| Ladezeit für Hörsystem                              | 10–30 °C: Maximal 5 Stunden, abhängig vom Anfangszustand des Akkus |
| Wireless-Frequenz zwischen Hörsystem und Ladeschale | 2,4 GHz und 135,6 kHz  |
| Übertragene Ausgangsleistung                        | Für 2,4 GHz: -11,86 dBm.   |

# Problemlösung

| Symptom              | Mögliche Ursache  | Mögliche Lösungen   |
|----------------------|---|---|
| Hörsystem lädt nicht | Ist das Hörsystem richtig in die Ladeschale eingesetzt?             | Auf korrekten Sitz der Einsätze achten. Legen Sie das Hörsystem in die Ladeschale.                  |
|                      | Ist die Ladeschale an eine funktionierende Steckdose angeschlossen? | Prüfen Sie, ob die LED neben dem Netzkabel auf der Rückseite der Ladeschale konstant grün leuchtet. |

## FAQ zur Ladeschale

|  |  |
|--|--|
| Wie bereite ich meine neue Ladeschale für den Einsatz vor? | Stellen Sie sicher, dass die Einsätze vorhanden sind. Verbinden Sie die Ladeschale einfach mit einer Steckdose, wie im Abschnitt „Erste Schritte“ beschrieben. |
|--|--|

## FAQ zur Ladeschale

Müssen die Hörsysteme aus der Ladeschale genommen werden, wenn sie vollständig geladen sind?

Nein. Sie können Ihre Hörsysteme beispielsweise über Nacht in der Ladeschale lassen.

Wie kann ich den Akkustand sehen?

Sie können den Akkustand in der App einsehen.

Muss ich vor dem Wiederaufladen die gesamte Akkuenergie aufbrauchen?

Nein. Regelmäßiges Laden, zum Beispiel über Nacht, gilt als normale Nutzung. Die Akkus in den Hörsystemen können bei jedem Ladestand geladen werden.

Muss ich die Hörsysteme vor der Verwendung vollständig aufladen?

Es wird empfohlen, die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Eine Teilaufladung schadet den Hörsystemen oder dem Akku nicht, jedoch bietet eine vollständige Ladung die längste Nutzungszeit.

## FAQ zur Ladeschale

Kann ich die Hörsysteme bei niedrigen Temperaturen laden?

Bei Temperaturen unter +5 °C werden die Hörsysteme nicht geladen.

Kann ich die Hörsysteme bei hohen Temperaturen laden?

Der Ladevorgang sollte zwischen +5 °C und +30 °C (86 °F) erfolgen.



# Garantie und Reparaturen

ReSound bietet bei Herstellungs- und Materialfehlern eine Garantie auf Hörsystemladeschalen, wie in der entsprechenden Garantiedokumentation beschrieben. In seinem Servicekonzept bürgt ReSound durch die Verwendung von Originalteilen oder -hörsystemen für eine gesicherte Funktion. Als Vertragspartner der United Nations Global Compact-Initiative verpflichtet sich ReSound, sich dabei nach den bewährten umweltverträglichen Verfahren zu richten. Dafür werden im Ermessen ReSound die Hörsystemladeschalen gegen neue oder aus neuwertigen Teilen gefertigte Ladeschalen ausgetauscht oder unter Verwendung neuer oder aufgearbeiteter Teile repariert. Die Garantiezeit der Hörsystemladeschale ist der Garantiekarte zu entnehmen, die Sie von Ihrem Hörakustiker erhalten haben.

Um Ihre Hörsystemladeschale überprüfen zu lassen, wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker. Sollte Ihre ReSound Hörsystemladeschale nicht funktionieren, muss sie von einem qualifizierten Servicetechniker repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Hörsystemladeschale zu öffnen, da dadurch die Garantie für die Ladeschale erlischt.

## **Erwartete Lebensdauer**

Die erwartete Lebensdauer der Ladeschale beträgt mindestens 5 Jahre.

# Temperaturprüfung, Transport und Aufbewahrung



**VORSICHT:** Wenn Ihr Hörsystem oder die Ladeschale sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, befolgen Sie die Richtlinien in diesem Abschnitt, um eine ordnungsgemäße Funktion und sichere Oberflächentemperaturen zu gewährleisten.



**WARNHINWEIS:** Wenn Sie Ihre Hörsysteme bei Umgebungstemperaturen über +30 °C (86 °F) laden, können sie gefährlich heiß werden und die Ladezeiten können sich verlängern.



**VORSICHT:** Während des Ladevorgangs können Ihre Hörsysteme Temperaturen bis 43 °C erreichen.

Im Normalbetrieb sollte die Temperatur die Grenzwerte von +5 °C (41 °F) bis +30 °C (86 °F) , bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 %, nicht kondensierend, jedoch ohne Wasserdampfpartialdruck über 50 hPa. nicht überschreiten, Ein Luftdruck zwischen 700 hPa und 1060 hPa ist unbedenklich.

Während Transport und Aufbewahrung darf die Temperatur folgende Grenzen nicht überschreiten:

- $-25\text{ °C}$  ( $-13\text{ °F}$ ) bis  $+5\text{ °C}$  ( $41\text{ °F}$ )
- $+5\text{ °C}$  ( $41\text{ °F}$ ) bis  $+35\text{ °C}$  ( $95\text{ °F}$ ) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %, nicht kondensierend
- $>+35\text{ °C}$  ( $95\text{ °F}$ ) bis  $+70\text{ °C}$  ( $158\text{ °F}$ ) bei einem Wasserdampfdruck von bis zu 50 hPa.

Aufwärmzeit (ab  $-25\text{ °C}$  bei  $20\text{ °C}$ ): 15 Minuten.


Abkühlzeit (ab  $+60\text{ °C}$  bei  $20\text{ °C}$ ): 20 Minuten.

# Position der Seriennummern

1. Position der Seriennummer auf der Ladeschale  
(Unteransicht der Ladeschale)



2. Position der Seriennummer auf dem Einsatz  
(Unteransicht des Einsatzes)

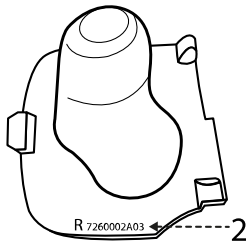

## **Abstimmen der Einsätze auf Ihr Hörsystem**

Ihre Hörsysteme werden mit Einsätzen für die Ladeschale geliefert, die speziell für Ihre Hörsysteme entwickelt wurden. Sie können jeden Einsatz dem richtigen Hörsystem zuordnen.

Die Seriennummer des Hörsystems befindet sich auf dem Gehäuse des Hörsystems.

Die Seriennummer des Einsatzes ist auf der Unterseite des Einsatzes aufgedruckt und folgt dem größeren gedruckten „L“ (für Links) oder „R“ (für Rechts).

Möglicherweise benötigen Sie eine Lupe, um die Ziffern zu lesen.

Die Seriennummer auf den Einsätzen hat folgendes Format:  
XX12345XXX.

Die ersten beiden Ziffern sind der Ländercode. Die nächsten fünf Ziffern sind die letzten fünf Ziffern der Seriennummer Ihres Hörsystems. Die letzten drei Markierungen geben das Produktionsjahr und die Produktionswoche an.

# Erklärung

## Hörsystemladeschale, Modell: C-4

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen und ICES-003 der ISED-Bestimmungen. Zum Betrieb des Geräts müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Das Gerät muss gegenüber allen Störungen unempfindlich sein, einschließlich solcher, durch die der Betrieb in ungewollter Weise beeinträchtigt werden könnte.



**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC- und ISED-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen beim Heimgebrauch gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzstrahlung und strahlt möglicherweise Radiofrequenzstrahlung aus. Wenn das Gerät nicht genau nach den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu Funkstörungen kommen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Ob das Gerät Ursache für eine bestimmte Störung des Radio- bzw. Fernsehempfangs ist, lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts ermitteln. Zur Behebung der Störung sollte der Benutzer dann einen oder mehrere der folgenden Schritte ausführen:

- Die Empfangsantenne an einen anderen Platz stellen oder neu ausrichten
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose, die nicht zum gleichen Stromkreis gehört, an den das Radio bzw. der Fernseher angeschlossen ist
- Nehmen Sie mit der/dem Händler:in oder einer/einem Radio-/Fernsehtechniker:in Kontakt auf.

Änderungen oder Umbauten können den Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Die Produkte erfüllen die folgenden gesetzlichen Vorschriften:

- In der EU: Das Gerät entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (MDR).



- Hiermit erklärt GN Hearing A/S, dass das Funkgerät des Typs C-4 der Funkgeräte-richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.
- Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:  
[www.declarations.resound.com](http://www.declarations.resound.com).
- In den USA: FCC CFR 47 Part 15, Subpart C.
- Für andere internationale Bestimmungen außerhalb der EU und der USA beachten Sie bitte die jeweiligen Länderbestimmungen.
- In Kanada: Dieses Gerät ist gemäß den ISED-Bestimmungen zertifiziert.
- Einhaltung des japanischen Rundfunk- und japanischen Fernmeldegesetzes: Dieses Gerät ist gemäß japanischem Rundfunkgesetz (電波法) und japanischem Fernmeldegesetz (電気通信事業法) zertifiziert.

Ladeschalentyp-Bezeichnungen der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Modelle:

FCC ID: X26C-4, IC-Nr.: 6941C-C4.

# Danksagungen

Teile dieser Software wurden von Kenneth MacKay programmiert (micro-  
ecc) und sind gemäß folgenden Bedingungen lizenziert:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Alle Rechte vorbehalten.

Die Neuverteilung und Verwendung in ursprünglicher und binärer Form,  
ob mit oder ohne Änderungen, ist unter Einhaltung der folgenden  
Bedingungen gestattet:

- Die Weiterverteilungen des Quellcodes müssen den Copyright-  
Vermerk, die Liste der Bedingungen und den folgenden  
Haftungsausschluss enthalten.
- Bei der Weitergabe in Binärform müssen der genannte  
Urheberrechtshinweis, diese Liste der Bedingungen und der folgende  
Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen mit  
der Distribution weitergegebenen Materialien enthalten sein.

**DIESE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR UND UNTER  
AUSSCHLUSS JEGLICHER AUSDRÜCKLICHEN ODER  
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH  
DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG BEZÜGLICH DER  
MARKTGÄNGIGKEIT SOWIE DER EIGNUNG FÜR EINEN**

BESTIMMTEN ZWECK (JEDOCH NICHT DARAUf BESCHRÄNKt),  
BEREITGESTELLT. DER URHEBERRECHTSINHABER ODER  
MITWIRKENDE HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR  
BELIEBIGE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE,  
EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH,  
JEDOCH NICHT BESCHRÄNKt AUF DIE BESCHAFFUNG VON  
ERSATZARTIKELN ODER -LEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN-  
ODER GEWINNVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DES  
GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND  
BELIEBIGER THEORETISCHER HAFTBARKEIT, OB VERTRAGLICH  
FESTGELEGT, PER KAUSALHAFTUNG ODER DELIKTHAFTUNG  
(EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG), DIE IN  
IRGEND EINER ART UND WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER  
SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT  
DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist ein  
eingetragenes Markenzeichen von GN Hearing A/S.

Hersteller gemäß EU-  
Richtlinie 2017/745 über  
Medizinprodukte:



GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dänemark

#### Ansprechpersonen vor Ort:

##### Deutschland

GN Hearing GmbH  
An der Kleimannbrücke 75  
DE-48157 Münster  
Tel.: +49 251-20 39 6-0  
Fax: +49 251-20 39 6-250  
info@gnresound.de  
resound.com

##### Österreich

GN Hearing Austria GmbH  
Modecenterstraße 22/ Top D48-  
D52  
1030 Wien  
Tel: +43 1 524 54 00  
info@gnresound.at  
resound.at

##### Schweiz

GN Hearing Switzerland AG  
Seestrasse 353  
8038 Zürich  
Tel.: +41 44 722 91 11  
info@gnresound.ch  
resound.ch



Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten sind, müssen dem gesetzlichen Hersteller GN Hearing A/S und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Kunde niedergelassen ist, gemeldet werden.